

heydent

Experience the difference



SERRA DENTAL

MEDİKAL TİC. LTD. ŞTİ.

www.serradental.com

0553 465 40 70 | [/serradental](https://www.instagram.com/serradental) | [/heydentturkiye](https://www.instagram.com/heydentturkiye)

JW NEXT

OFIS TİPİ POWER BLEACHING JEL



heydent[®]
Experience the difference

YENİ NESİL JW NEXT OFİS TİPİ POWER BLEACHING JEL İLE TANIŞIN



Diş hekimliğinde kullanılan ofis tipi beyazlatma jelidir. Vital veya devital dişlerde kullanılabilir. 5 grlık tüplerde 4/1 oranında automiks sistem, kullanıma hazır **%35 hidrojen peroksit** içermektedir.

Saklama Koşulları

3-9 °C da serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Son kullanma tarihi geçen ürünlerin beyazlatma etkisi azalacaktır. Dondurmayınız. **Yan etki:** Klinik araştırmalarında çok nadiren yan etki görülmüştür.

Kullanım Alanları

Renklenmiş Dişlerde, Devital Dişlerde, Tetrasiklin Dişlerde **İçeriği:** Su, hidrojen peroksit, potasyum nitrat, sodyum florid, glikol, kıvam verici ve renklendirici.

Ofis Tipi Beyazlatma İçin Uygulama

5 grlık tüpü işlem öncesi kilit sistemini açarken hastadan ve kendinizden uzak tutunuz. Tüpe karıştırma ucunu takınız. Karıştırma ucundan jelin karışmış ve tek renk (kırmızı) gelene kadar küçük bir parça pamuğa sıkınız. Jeli uzun süre yüksek ısıda saklamak hava baloncucu oluşmasına neden olabilir. Bu durum jelin homojen şekilde karışmasını engeller. Jeli dişe **1-2 mm** kalınlığında uygulayabilirsiniz ve aynı ucla dişin yüzeyine yayabilirsiniz. Standart plazma, ark veya lazer reaksiyonu hızlandırmak için kullanılabilir. Ancak fazla ısıya maruz bırakılmamalıdır. Hem ışıklı hem de ışısız aktif olabilir. **10 dakikalık** ilk uygulamadan sonra jeli aspire ederek temizleyin. Eğer sonuç yeterli değil ise beyazlatma işlemini ikinci kez tekrarlayabilirsiniz. Aynı gün içerisinde hastaya **10x3** seans uygulanabilir. İstenilen sonuç elde edilmediyse hasta **1 hafta** sonra seans için hazırdır. İstenilen sonuç elde edildikten sonra jel aspire edilip temizlenir. Diş eti bariyeri çıkarılır. Diş yüzeyi kurutulduktan sonra polisaj yapılır. Sonrasında fluoride uygulaması yapılabilir. Bu hassasiyet için yardımcı olacaktır. İşlem sonrası karıştırma ucu çıkarılıp tüpe koruma kapağı ve kilit sistemi takılarak **3-9 °C** arası serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Dondurmayınız. İşlem sonrası **1 saat** sigara içilmemeli ve yemek yenmemelidir. Yüksek miktarda leke oluşumuna sebep olabilecek kırmızı şarap, kahve, çay, asitli içecekler gün boyu kullanılmamalıdır. Beyazlatma jelinden dolgular ve porselenler etkilenmez bu yüzden ihtiyaç duyulursa beyazlatma işleminden **2 hafta** sonra değiştirilebilir.

Devital Dişlerde Beyazlatma İçin Uygulama

Pulpa odasının alveol kreti seviyesine kadar dolgusu boşaltılmalı ve **1-2 mm** kalınlığında cam iyonomer simanla kanal başları kapatılmalıdır. Diş eti bariyeri hem labial hem de linguale uygulanmalıdır. Vital beyazlatmalarda olduğu gibi dişin labialine ve pulpa odasına **10 dakika** süreyle beyazlatma uygulanır. Sonrasında yıkayıp aspire edilir. İstenilen sonuç elde edilene kadar işlem aynı gün içerisinde **10x3** seans uygulanabilir. Daha sonra ojenölsüz geçici dolgu uygulanır. Daimi dolgunun **2 hafta** sonra yapılması tavsiye edilir.



HeyTEC-NR

Nano Hibrit Kompozit



HeyTec-NR "Nano Devrimi" Heydent restoratif ailesindeki devrim niteliğindeki yeni Nano Kompozittir. HEYTEC-NR, uzun ömürlü dolgular için, ortam ışığına karşı duyarlılığı önemli ölçüde azaltılmış ve mükemmel fiziksel değerlere sahip çok yönlü bir kompozittir. Hem tüm kavite sınıflarının restorasyonları hem de inley, onley ve veneer yapımı için endikedir.

Renkler; A1 / A2 / A3 / A3,5 / OA2 / OA3 / B1

HeyTEC-N

Nano Hibrit Kompozit



Şekillendirilmesi o kadar kullanışlı ve kolaydır ki kıvamına "Balmumu benzeri" denir! HeyTec-N, diş hekiminin uzun vadeli güvenilir sonuçları garanti eden mekanik özelliklere sahip son derece estetik restorasyonlar oluşturmasına olanak tanır. 4 gr 'lık şırınga ve 0,3 gr 'lık kapsüller halinde mevcuttur.

Renkler; A1 / A2 / A3 / A3,5 / OA2 / OA3 / B1 / B2 / D2 / D3 / INC

HeyTEC-NC

Nano Seramik Kompozit

Nano teknoloji kullanılarak üretilmiş, organik ve inorganik parçacıklardan oluşan Nano Seramik dolgu malzemesidir. Ön ve arka dişlerde kullanılabilir. Düşük polimerizasyon büzülmesi, geliştirilmiş aşınma kabiliyeti ve mükemmel cilalanabilirlik gibi optimize edilmiş malzeme özellikleri ile mükemmel kullanımı her diş hekimine ilham verir! 5 gr şırıngalar şeklinde sunulur.

Renkler; A1 / A2 / A3 / A3,5 / OA2 / OA3 / B1 / B2 / INC / BLI / BLX



Avantajlar

- 1.Aşınma direnci
- 2.Mükemmel estetik için düşük büzülme
- "Bukalemun etkisi"
- 3.Kolay cilalama
- 4.Uzun süreli parlaklık
- 5.Rahat modelleme
- 6.Yapışkan olmayan etki
- 7.Geniş uygulama yelpazesi

HeyTEC-MR

Mikro Hibrit Kompozit

HEYTEC-MR, yüksek oranda inorganik dolgu maddesi içeren, ışıkla sertleşen universal bir kompozittir. HEYTEC-MR hem ön hem de arka bölgelerdeki doğrudan restorasyonlar inley, onley ve kaplamaların yapımı için uygundur. HEYTEC-MR aynı zamanda kor oluşumu ve genişletilmiş fissür kapatma için de uygundur.



Makro ve mikro dolgu maddelerinin özel kombinasyonu HEYTEC-MR' ye olağanüstü fiziksel özellikler kazandırır ve cilalanmasını kolaylaştırır. Bu mükemmel nitelikleri sayesinde bu malzeme plaklara karşı son derece dayanıklıdır.HEYTEC-MR' nin özellikle biyoyumlu olduğu ve diş etlerine karşı hassas olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 4 gr şırıngalar şeklinde sunulur.

HeyTEC-BLEACH HeyTEC-BLEACH-X

Hibrit Kompozit

Doğrudan kompozit dolgu ve kompozit lamina için yaygın olarak kullanılan seramik hibrit kompozittir.



Mükemmel kıvam ve içerdiği özellikler sayesinde son derece estetik işleri garanti eder. Heytec Bleach renk skalasına sahip olup Bleach-X ultra yoğun ve en açık renge sahiptir. 5 gr şırıngalar şeklinde sunulur.

HeyTEC-Flow-V

Flow Viskoz Kompozit

Doğrudan restorasyonlar, astarlama ve çatlakların kapatılması için yeni nesil ışıkla sertleşen ve radyopak akışkan bir kompozittir.



HEYTEC Flow-V hem akıcı hem de gerektiğinde viskozudur ve duvar boşluklarına iyi uyum sağlar. İdeal akış özellikleri restorasyonu kolaylaştırır. 1,2 ml'lik şırıngalar şeklinde sunulur.

Renkler;
A1 / A2 / A3 / A3,5 / B1 / CLEAR / BLEACH

HeyTEC-Bulk UD Akışkan Bulk Fill Kompozit

Bulk Fill UD, Bulk Fill tekniği kullanılarak kalıcı süt ve arka dişlerde doğrudan dolgular için kullanılan akıcı bir kompozittir. Akışkanlığın esnekliğe olan optimum oranı sayesinde uygulanması ve şekillendirilmesi hızlı, pratik ve kolaydır.



HEYTEC-Bulk Fill UD, katman tekniği misyonuyla tek adımlı rekonstrüksiyonlar için tasarlanmıştır. Gerektiğinde çekirdek katman olarak kullanılabilir ve daha sonra kalıplanabilir bir kompozitle kaplanabilir. Özel monomer matrisi, alttan kesikler olsa bile malzemenin duvar boşluklarına mükemmel bir şekilde uyum sağlar. HEYTEC-Bulk Fill UD, (UD - Universal Dentin) kendine özel, "Bukalemun Etkisi" sayesinde son restorasyonun estetik kalitesini üst düzeyde etkiler. 2g şırınga ve 0,25g kompüller halinde mevcuttur.

HeyTEC-Universal Tek Renk Hibrit Kompozit

Ön ve arka restorasyonlarda tüm doğal diş renklerinde kullanılabilen, yalnızca renk uyumu sağlayan bir kompozit kullanmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiştir. HeyTEC Universal mükemmel fiziksel özellikler ve iyi kullanım özellikleri gösterir. Toplam dolgu maddesi içeriği ağırlıkça %75'tir. Çok fazla renk değişikliği olan bir kavite durumunda veya daha büyük Sınıf III veya IV defektlerde ağız boşluğunu kapatmak için daha yüksek bir opaklığa ihtiyaç duyulursa, HEYTEC Universal BLOCK kullanılabilir. 4 gr şırıngalar şeklinde sunulur.



AVANTAJLAR

Yüksek Transparanlık
Radyopak
Mükemmel Bukalemun Etki
Tek renk bütün dişlerin kapsar.

H-ETCHBOND

7. Jenerasyon Bond

ETCHBOND ışıqla sertleşen, kendiliğinden aşındıran tek bileşenli bir bonding sistemidir.. Direkt kompozit dolgular ve indirekt restorasyonların simantasyonunda kullanılır. Sadece bir bağlama maddesi olarak görev yapmakla kalmaz, aynı zamanda pulpayı termal uyarılardan ve örneğin hazırlama sonrasında bakteriyel infiltrasyondan da korur.

7th Generation
Generation



H-ETCHBOND aşağıdakiler için uygundur:

- Işıqla sertleşen restoratif kompozitlerin simantasyonu
- Işıqla ve çift sertleşen kompozitle kor yapları
- İndirekt seramik ve kompozit restorasyonların ışıqla veya çift sertleşen yapıştırma kompozitleriyle adeziv simantasyonu
- Işıqla sertleşen kompozit restorasyonların onarımı
- 5 ml şişeler şeklinde sunulur

JWLIQUID DAM Diş Eti Bariyeri

Ofis içi beyazlatma jelleri ile tedavi sırasında diş etini kaplamak için tek bileşenli malzeme.

Özellikler

- Optimum viskozite
- İyi akış özelliği
- Polimerizasyon süresi sadece 20 sn.
- Çok düşük ısı gelişimi
- Lastik bir baraj ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde zaman tasarrufu
- Kolay uygulama Renkli mavi şırıngalarda mevcuttur.



HeyTEC-Core-N

Nano Core Siman

HeyTec Core N, postların kor yapımı ve simantasyonu için nano parçacıklara (nano-zirkonyum dioksit, nano-kalsiyumflorür) sahip, çift kürlenene, akıcı bir kompozit malzemedir. Kök postuyla birlikte kalıcı diş rekonstrüksiyonu için homojen ve dayanıklı bir yapı oluşturur. HEYTEC Core N'nin olağanüstü mekanik özellikleri, yenilikçi molekül yapısından kaynaklanmaktadır.



CORE N basma ve bükülmeye karşı oldukça dayanıklıdır. Bu özellikler HEYTEC Core N'yi doğal dentinin mükemmel bir alternatifi haline getirir. Kalsiyum florürün nano partiküllerinin içeriği, dentin remineralizasyonuna izin verir ve nano-zirkonya partikülleri mükemmel röntgen görünürlüğü sağlar.

HeyTEC-Cem SE

Self Etch Dual Rezin Siman

HeyTec Cem SE kalıcı simantasyonlar için self-adhesive, dual sertleşen yapıştırma simanıdır. HeyTec Cem SE kullanıldığında diş yapısının iyileştirilmesine ve yapıştırılmasına gerek yoktur. : 1 x 5 ml şırıngalarda sunulur.



SADECE TEK BİR ÇALIŞMA ADIMINDA AŞINDIRMA, ASTARLAMA, YAPIŞTIRMA, HAZIRLAMA VE SEMENTASYON

HeyTEC-CemX Dual Cure Universal Rezin Siman

HEYTEC CemX, dual cure bir sistem olup kanal pimleri, inley, onley, veneer, hem seramik hem de kompozit kuronlar ve köprüler için son derece radyo opak, floresan etkili ve aşınmaya karşı oldukça dayanıklı akışkan bir simantasyon ürünüdür.



HEYTEC CemX, yeni nesil self-adhesive rezin simanıdır. **Renkler:** A1 / A2 / A3 / A4 / B1 ve yarı transparan Ambalaj boyutu: 8g çift kartuş

HeyTEC-CemVeneer

Siman

HEYTEC Cem Veneer; porselen kompozit ve seramik kaplamaların yapıştırılması ve kavite astarlanması için ışıkla sertleşen, tek bileşenli yüksek derecede radyo opak bir simanıdır.



HEYTEC Cem Kaplama BisGMA, Bis EMA ve TEGDMA içermez ve oldukça viskozdur. 2gr şırıngalar şeklinde sunulur. **Renkler;** A1 / A2 / A3 / BLEACHX / TRANSPARAN

HeyTEC-Semi

İmplant Üstü Geçici Yapıştırıcı

İmplantlar ve doğal dişler üzerindeki kuron ve köprülerin simantasyonu için çift kürlenene, yarı kalıcı bir simanıdır.



Hiçbir kimyasal yapışma (0 MPa) simanın kontrollü genişmesiyle telafi edilmez. Bu, restorasyonun en iyi şekilde sabitlenmesini ve hasar görmeden çıkarılmasını sağlar.

HeyTEC-Temp

Geçici Kron Akriliği

HEYTEC Temp Geçici protez malzemeleri arasında bir yeniliktir. Önemli ölçüde artan dolgu maddesi/katalizör oranı (4:1), mükemmel estetik ve mekanik dayanıklılıkla sonuçlanır.



Tüm bu malzeme özellikleri, önceliğimiz olan diş hekimlerinin ve hastaların memnuniyetini garanti eder. **Renkler;** A1 / A2 / A3 / BLEACH



heydent^l
Experience the difference



Abide-i Hürriyet Cad. No: 95/1 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 219 21 91 info@serradental.com



0553 465 40 70 | /serradental | /heydentturkiye

www.serradental.com